


COVID-19 a Influenza A+B Antigen Combo rýchly test (nasofaryngeálny výter) 014L419

Rýchly antigénový test na kvalitatívnu detekciu vírusov COVID-19 a chrípky A+B vo vzorkách nasofaryngeálneho steru v jednom kroku. Výhradne pre profesionálne využitie.

Postup a odčítanie výsledku


Odobraná vzorka sa vyextrahuje do skúmavky s extrakčným puifrom, kvapne sa na kazetku do jamky na vzorku a po 15 minútach sa vizuálne odčíta výsledok.

Podrobnejšie informácie viď návod.

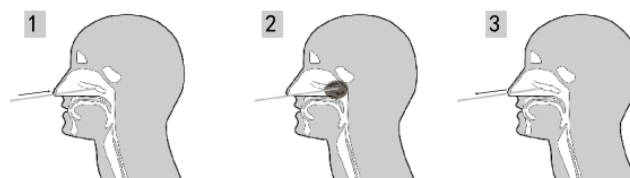

Súprava obsahuje

- Testovacie kazety
- Extrakčný puifrom
- Extrakčné skúmavky
- Uzávery na extrakčné skúmavky
- Príbalový leták
- Pracovný stojan
- Výterové tampóny

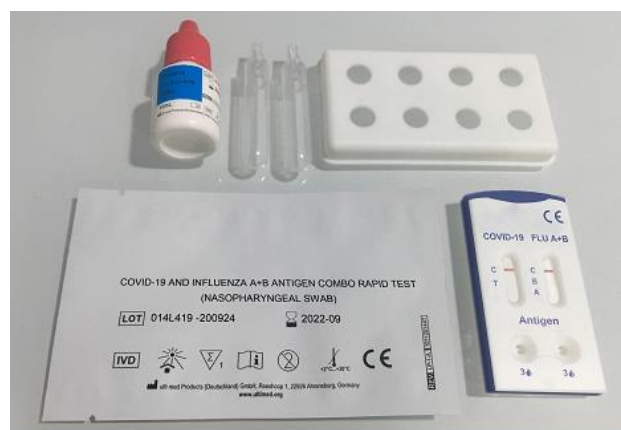

Senzitivita, špecificita a presnosť stanovenia.

Vzorky získané od pacientov nasofaryngeálnym sterom boli testované ulti med COVID-19 a Influenza A+B Antigen Combo rýchlym testom a RT-PCR metódou. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

	COVID	Influenza A	Influenza B
Relatívna senzitivita	85.0% (95%CI*: 62.1%~96.8%)	94.1% (95%CI*: 71.3%~99.9%)	91.7% (95%CI*: 61.5%~99.8%)
Relatívna špecificita	98.3% (95%CI*: 91.1%~>99.9%)	98.4% (95%CI*: 91.5%~>99.9%)	100.0% (95%CI*: 95.7%~100.0%)
Presnosť	95.0% (95%CI*: 87.7%~98.6%)	97.5% (95%CI*: 91.3%~99.7%)	98.8% (95%CI*: 93.2%~>99.9%)

Certifikácia : 



Sídlo spoločnosti :

JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 43, 900 31, Stupava
tel.: + 421 264 774 591

Objednávky :

Písomný kontakt:
JK-Trading s.r.o.
P.O.BOX 053, Pošta 49
841 07 Bratislava

email: jk-trading@jk-trading.sk